

MASQUE BARRIÈRE COTON adulte

Le masque «entreprise» & «grand public» en coton lavable et réutilisable.

Le masque : masque barrière anti-projections et anti-poussières en tissu 100% coton, lavable et réutilisable, UNS2, catégorie 2.

Composition :

- extérieur en popeline de coton 133x72, 130 grs/m²,
- intérieur matelassé en ouatine polyester 100 grs/m²,
- doublure n°1 intérieure en popeline de coton blanc 133x72,
- doublure n°2 en jersey de coton blanc 130 grs/m²,
- 2 lies de maintien aux oreilles en ruban tissé élasthané.

Conformité : conforme aux spécifications AFNOR SPEC S76-001:2020, catégorie 2.

Fonctionnalités :

Morphologie : coupe demi-masque facial, qui épouse la forme du bas du menton et celle du haut du nez. Un « pince nez » en plastique déformable est incorporé dans l'ourlet supérieur.

Jonction : lies élastiques souples et réglables pour un bon appui des pourtours du masque contre le visage.

Confort : appui facial en coton doux et avec rembourrage ouatine pour le confort.

Filtration : composé de 4 couches dont 3 filtrantes et une diffusante, la filtration du masque est conformes aux spécifications AFNOR SPEC S76-001:2020, cat. 2. Soit une filtration de plus de 90% des particules de diamètre supérieur à 3µm. Voir rapport de tests LNE N°P201894 du 11 juin 2020.

Respirabilité : les couches diffusantes du masque permettent une respirabilité, mesurée avec la perméabilité sous une différence de pression (100 Pa, de 96% en litres/m²/seconde).

Identité : étiquette pour que le propriétaire y écrive son nom.

Durée de chaque utilisation : le masque ne doit jamais être utilisé pendant plus de 4 heures, soit plus d'une demi-journée. Pendant cette période, il peut être déposé et reposé à la seule condition qu'il soit manipulé et accroché par les brides élastiques et en limitant au maximum les contacts. Le laver avant chaque nouvelle réutilisation.

Durée de vie : la durée de vie du masque ne doit excéder un délai de 2 ans à partir de la date d'acquisition, la facture du distributeur faisant foi et délai au-delà duquel il faut le masque remplacer par un neuf.



Etiquette produit

100% COTON
 Ref SMC ADULTE
 Masque de protection à usage non-médical.
 Voir: serie-graffic.com

Phénix300dpi Serres-Moriàas
 Avant utilisation, lire la notice d'emploi jointe ou www.phenix300dpi.com

Mettre le masque : bien s'assurer que le masque soit en bon état, propre, sec, qu'il ait été stocké à l'abri des risques de contamination et qu'il n'ait pas déjà été utilisé pendant plus de 4 heures depuis son dernier lavage. Prendre le masque à l'endroit par ses brides élastiques en l'appliquant sur le visage. Bien ajuster le masque en le plaquant afin que l'air ne passe pas : adapter la forme du haut du masque en pinçant le haut du nez, ajuster la tension des 2 brides élastiques avec leurs curseurs. S'assurer que tous les bords du masque plaquent bien contre la peau du visage, sans aucun cheveux ni de barbe.

Mettre le masque

S'assurer que le masque soit en bon état, propre, sec, et à l'abri de tous risques de contamination.




Poser le masque et passer les élastiques derrière les oreilles



Ajuster les élastiques



Pincer le haut du nez pour adapter le masque

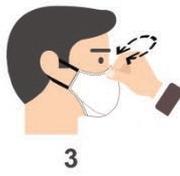

Sortir le masque

Saisir le masque par ses 2 brides élastiques sans toucher le devant



Sortir le masque : saisir le masque par ses 2 brides élastiques sans toucher le devant du masque qui est souillé par les résidus de la filtration. Au-delà de 4 heures d'utilisation, placer le masque dans un sachet en plastique pour l'isoler jusqu'à l'avoir lavé.

Nettoyage et séchage : en usage quotidien il faut laver le masque chaque jour en machine à 60°C avec un cycle de 30 mn minimum et de la lessive, sans javel ni nettoyage à sec, voir symboles d'entretien sur l'étiquette. Le masque barrière souillé doit être isolé, par exemple dans un sachet hydrosoluble et n'être en contact direct ni avec les mains, ni avec le linge à laver ou autre.

Aussitôt lavé le sécher sans attendre au sèche-linge parfaitement à cœur.



S'assurer qu'il soit bien sec et en bon état avant de le remettre.

Le nombre maximum de lavages est de 50. Voir rapport de tests M.Vêtement du 17 mai 2020.

Au-delà de 50 lavages ou auparavant s'il est détérioré, isoler le masque dans un sachet, le jeter à la poubelle et le remplacer par un neuf.


Détérioration : en cas moindre détérioration même mineure du masque ou de ses brides élastiques, le masque perd alors ses caractéristiques et doit aussitôt être remplacé par un neuf.

Jeter le masque : éviter le contact direct avec les mains et isoler le masque dans un sachet plastique fermé avant de le jeter à la poubelle.

Hygiène : manipuler le masque souillé avec précaution : après chaque manipulation du masque, bien se laver les mains avec du savon et à défaut de point d'eau avec du gel hydro-alcoolique. Toujours éviter tout contact avec le devant qui est chargé des résidus de la filtration. Manipulation de l'article : bien lire la notice d'utilisation jointe avec le masque avant de le manipuler.

Notamment

Taille : taille unique adolescent et adulte, homme et femme, ajustable aux oreilles avec curseurs en caoutchouc.

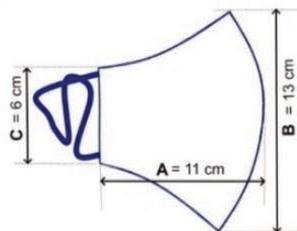

Poids : environ 25 grs.

Emballage : livré sous sachet individuel avec les informations légales et une notice d'utilisation.

Il est conditionné par pack de 50 à la couleur.



Coloris : l'intérieur est blanc, la lie élastique est noire, l'extérieur est des différents coloris ci-dessous.



La notice d'utilisation : en français, pour la bonne utilisation du masque, elle est jointe à chaque masque. Elle est également téléchargeable sur www.phenix300dpi.com.

Information légale : l'emballage du produit porte toutes les informations légales.

Destination : le masque barrière est destiné à compléter sans les exonérer, tous les gestes barrières et les règles de distanciation sociale essentiels à la lutte contre la propagation des infections et notamment virales de type COVID-19.

Public concerné :

il s'adresse aux personnels des entreprises ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes dans leur cadre professionnel, mais pas aux personnels recevant habituellement du public. Il est aussi destiné au grand public et dans tous cas, en bonne santé.

Effets : il protège l'ensemble d'un groupe portant ces masques et sans contact avec le public. Ce masque pourra être porté par l'ensemble des individus d'un sous-groupe (entreprise, service...) ou en présence d'autres individus porteurs d'un masque, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent.

Autres informations : toute autre information sur le produit peut être obtenue sur simple demande via le contact sur contact@phenix300dpi.com.

Information emballage

MASQUE BARRIERE - AFNOR SPEC S76-001:2020

Masque barrière catégorie 2, en coton lavable et réutilisable.

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Durée d'utilisation maxi entre 2 lavages : 4 heures, nombre maxi de lavages 50 et dans la limite d'une durée de 2 ans.

Lavage en machine à 60°C, avec un cycle mini de 30 mn, séchage au sèche-linge.



Efficacité de filtration des particules de 3 microns >70%.

Perméabilité à l'air (en L/m²/s) > 96 sous dépression de 100 Pa.

conformément à l'avis de l'ANSM du 25 mars 2020 révisé. V3 – 29-4-2020

Voir notice dans l'emballage



Covid -19 du 23/09/2020 – V8M

Les informations indiquées et les photos ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis en fonction de la réglementation ou des impératifs dictés par la conjoncture.